

2005年4月1日(第1版)  
2017年4月1日(第2版)

届出番号40B3X00012000002

医04 整形用品  
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

# カ ッ ト ガ ー ゼ

## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

### 【包装】

パッケージに入数を記載。

### 【形状、構造及び原理等】

綿100%のガーゼ

本品は、白い布で、におい及び味はない。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、  
液体の吸収を行う。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 龍宮株式会社

福岡県うきは市吉井町新治278

TEL 0943-75-3148

製造業者

龍宮株式会社

### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官  
の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に  
適用することを目的とする主としてガーゼからなる器具を  
いう。

### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。

滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

### 【使用上の注意】

本品の使用は一回限りです。再使用しないこと。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管  
すること。

開封後は速やかに使用すること。