

2005年4月1日(第1版)
2017年4月1日(第2版)

届出番号40B3X00012000003

医04 整形用品
一般医療機器 綿状パッド 32572000

カ ッ テ ガ ー ゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【包装】

パッケージに入数を記載。

【形状、構造及び原理等】

医療脱脂綿と医療ガーゼ等を物理的に結合したものである。本品は白色のシート状で、におい及び味はない。セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 龍宮株式会社

福岡県うきは市吉井町新治278

TEL 0943-75-3148

製造業者

龍宮株式会社

【使用目的又は効果】

粘膜、皮膚の保護及び分泌物の吸収

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。
創傷面には滅菌して使用する。
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

本品の使用は一回限りです。再使用しないこと。
体内に留置しないこと。
使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない
清潔な場所に保管すること。
開封後は速やかに使用すること。